

ツインクル カップ

Bipolar Cup for ArthROM Stem



TWINKLE CUP SYSTEM

製品特長

- 容易な操作性を考慮したワンタッチ方式を採用
- 臼蓋へのフィットを考慮した豊富なサイズバリエーション

● BLEND-E[®] XL

BLEND-E[®] XLはビタミンEの抗酸化能とクロスリンクによる股関節に最適な力学特性を有した、日本で生まれた新たな股関節用摺動部材です。



Twinkle Bipolar Surgical Procedure


1. 大腿骨頭の抜去

股関節を展開した後、骨頭除去器を用いて寛骨臼から大腿骨頭を抜去します。




2. 大腿骨頭の計測

取り出された大腿骨頭をキャリパーを用いて計測します。

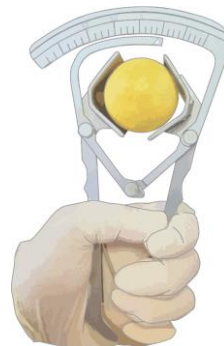

3. 適切な骨頭サイズの決定

カップトライアルをトライアルハンドルに取り付け、寛骨臼にツインクルカップトライアルを挿入して、適切な骨頭サイズを決定します。

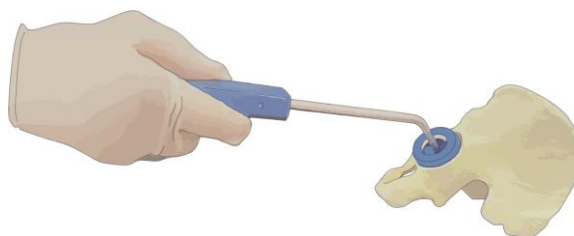

4. 大腿骨ステムの挿入と仮整復

ボックスチゼル、スターターリーマー、ブローチの順に大腿骨髄腔を形成し、術前に検討された骨頭トライアルをステムネックに取付けます。術中に選択されたツインクルカップトライアルを骨頭トライアルに装着します。可動域や脚長差に問題ないことを確認します。



5. フェモラルヘッドの設置

アースロムステムを大腿骨髄腔に打ち込んだ後、仮整復で選択した骨頭トライアルと同じサイズのフェモラルヘッド(φ22mm,φ26mm)を選択し、フェモラルステムのトラニオンに打ち込みます。



6. ツインクルカップの設置



7. 整復

インプラントの設置が完了した後、股関節を整復し、可動域や脚長差に問題ないことを確認します。

【ツインクルカップ抜去方法】



カップ外し器のスリット部をステムネック部に通して、ツインクルカップの挿入口に入れます。カップ外し器を矢印の方向に押し込み、ツインクルカップも矢印の方向に引くことでカップを抜去できます。





製品番号	製品名	サイズ
MPK50338	ツインクルカップ (骨頭Φ22)	Φ38
MPK50339	ツインクルカップ (骨頭Φ22)	Φ39
MPK50140	ツインクルカップ (骨頭Φ22)	Φ40
MPK50141	ツインクルカップ (骨頭Φ22)	Φ41
MPK50142	ツインクルカップ (骨頭Φ22)	Φ42
MPK50143	ツインクルカップ (骨頭Φ22)	Φ43
MPK50244	ツインクルカップ (骨頭Φ26)	Φ44
MPK50245	ツインクルカップ (骨頭Φ26)	Φ45
MPK50246	ツインクルカップ (骨頭Φ26)	Φ46
MPK50247	ツインクルカップ (骨頭Φ26)	Φ47
MPK50248	ツインクルカップ (骨頭Φ26)	Φ48
MPK50249	ツインクルカップ (骨頭Φ26)	Φ49
MPK50250	ツインクルカップ (骨頭Φ26)	Φ50
MPK50251	ツインクルカップ (骨頭Φ26)	Φ51
MPK50252	ツインクルカップ (骨頭Φ26)	Φ52
MPK50253	ツインクルカップ (骨頭Φ26)	Φ53
MPK50254	ツインクルカップ (骨頭Φ26)	Φ54
MPK50255	ツインクルカップ (骨頭Φ26)	Φ55



販売名：ブレンド-E XL バイポーラカップⅡ 医療機器製造販売承認番号：30300BZX00232000
 製造販売元：帝人ナカシマメディカル株式会社

製品番号	製品名	サイズ
5H122201	フェモラルヘッド 12/14 TAPER	Φ22 (-2)
5H122202	フェモラルヘッド 12/14 TAPER	Φ22 (±0)
5H122203	フェモラルヘッド 12/14 TAPER	Φ22 (+3)
5H122601	フェモラルヘッド 12/14 TAPER	Φ26 (-3.5)
5H122602	フェモラルヘッド 12/14 TAPER	Φ26 (±0)
5H122603	フェモラルヘッド 12/14 TAPER	Φ26 (+3.5)



販売名：TNコバルトクロムヘッド 医療機器製造販売承認番号：22900BZX00280000
 製造販売元：帝人ナカシマメディカル株式会社

スタンダードステムスタンダードオフセット			
カタログ番号	サイズ	オフセット	ステムタイプ
A1127-0033	#00	スタンダードオフセット	スタンダード
A1127-0134	#01	スタンダードオフセット	スタンダード
A1127-0235	#02	スタンダードオフセット	スタンダード
A1127-0336	#03	スタンダードオフセット	スタンダード
A1127-0437	#04	スタンダードオフセット	スタンダード
A1127-0538	#05	スタンダードオフセット	スタンダード
A1127-0639	#06	スタンダードオフセット	スタンダード
A1127-0741	#07	スタンダードオフセット	スタンダード
A1127-0843	#08	スタンダードオフセット	スタンダード
A1127-0945	#09	スタンダードオフセット	スタンダード
A1127-1046	#10	スタンダードオフセット	スタンダード
A1127-1147	#11	スタンダードオフセット	スタンダード

スタンダードステムハイオフセット			
カタログ番号	サイズ	オフセット	ステムタイプ
A1127-0038	#00	ハイオフセット	スタンダード
A1127-0139	#01	ハイオフセット	スタンダード
A1127-0240	#02	ハイオフセット	スタンダード
A1127-0341	#03	ハイオフセット	スタンダード
A1127-0442	#04	ハイオフセット	スタンダード
A1127-0543	#05	ハイオフセット	スタンダード
A1127-0644	#06	ハイオフセット	スタンダード
A1127-0746	#07	ハイオフセット	スタンダード
A1127-0848	#08	ハイオフセット	スタンダード
A1127-0950	#09	ハイオフセット	スタンダード
A1127-1051	#10	ハイオフセット	スタンダード
A1127-1152	#11	ハイオフセット	スタンダード



ショートステムスタンダードオフセット			
カタログ番号	サイズ	オフセット	ステムタイプ
A1127-0033S	#00	スタンダードオフセット	ショート
A1127-0134S	#01	スタンダードオフセット	ショート
A1127-0235S	#02	スタンダードオフセット	ショート
A1127-0336S	#03	スタンダードオフセット	ショート
A1127-0437S	#04	スタンダードオフセット	ショート
A1127-0538S	#05	スタンダードオフセット	ショート
A1127-0639S	#06	スタンダードオフセット	ショート
A1127-0741S	#07	スタンダードオフセット	ショート
A1127-0843S	#08	スタンダードオフセット	ショート
A1127-0945S	#09	スタンダードオフセット	ショート
A1127-1046S	#10	スタンダードオフセット	ショート
A1127-1147S	#11	スタンダードオフセット	ショート

ショートステムハイオフセット			
カタログ番号	サイズ	オフセット	ステムタイプ
A1127-0038S	#00	ハイオフセット	ショート
A1127-0139S	#01	ハイオフセット	ショート
A1127-0240S	#02	ハイオフセット	ショート
A1127-0341S	#03	ハイオフセット	ショート
A1127-0442S	#04	ハイオフセット	ショート
A1127-0543S	#05	ハイオフセット	ショート
A1127-0644S	#06	ハイオフセット	ショート
A1127-0746S	#07	ハイオフセット	ショート
A1127-0848S	#08	ハイオフセット	ショート
A1127-0950S	#09	ハイオフセット	ショート
A1127-1051S	#10	ハイオフセット	ショート
A1127-1152S	#11	ハイオフセット	ショート



販売名：アースロム人工股関節システム 製造販売承認番号：30200BZX00308000
 製造販売元：株式会社ジョイアップ